



INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS RESTOS EMBRIONARIOS (VELLOSIDADES CORIALES O PIEL) PARA ESTUDIO CROMOSÓMICO

1. Solicitar al laboratorio el **kit estéril de transporte** de muestra. De no ser posible adquirirlo utilizar un frasco y suero fisiológico estériles.
2. Colocar la muestra en el frasco estéril y agregar el medio de cultivo del **kit estéril de transporte (enviar todo el producto del aborto para hacer la selección correspondiente)**.
Si se tratara de un feto mayor a 15 semanas, enviar toda la placenta.

Recordar que el estudio se realiza a partir de las **vellosidades coriales**; sí es posible puede agregar una muestra de talón del feto para cultivar muestra de piel con el objetivo de garantizar el resultado.

3. Remitir la muestra inmediatamente al laboratorio, de no ser posible, conservarla máximo **24 horas en refrigeración. NO CONGELAR.**
4. **Para el envío desde el interior del país**, la muestra debe transportarse junto con geles refrigerantes, **evitando el contacto directo del gel con la muestra** y enviarlo por el medio de transporte más rápido. Comunicarse con el laboratorio, **coordinar la hora de llegada** de la muestra para facilitar la disposición de recursos para su procesamiento.
5. Enviar la ficha de remisión con los datos del paciente:
 - Nombre de la paciente
 - DNI
 - Edad
 - Semanas de gestación
 - FUR
 - Diagnóstico presuntivo
 - Correo electrónico
 - Número de contacto
 - Nombre del médico tratante

IMPORTANTE: En caso de no crecimiento de las células del cultivo, el estudio será reemplazado por el estudio de cromosomas a los padres.

