



## INSTRUCCIONES PARA ENVÍO DE MUESTRAS DE LÍQUIDO AMNIÓTICO PARA ESTUDIO CROMOSÓMICO

1. Tomar la muestra a partir de la semana 16 de gestación. Las muestras con semanas de gestación entre 14 y 15 tiene células escasas lo que podría aplazar la entrega de resultados.
2. Para la obtención de muestra utilizar de preferencia jeringas de marca Nipro, Rymco ó Terumo.
3. La muestra de Líquido amniótico obtenida (15 -20 MI) debe conservarse en la jeringa fijando el émbolo, la aguja y el capuchón con esparadrapo o cinta adhesiva.
4. Remitir la muestra inmediatamente al laboratorio a temperatura ambiente, de no ser posible conservarla máximo 24 horas **a temperatura ambiente, NO CONGELAR NI REFRIGERAR**
5. **Para el envío desde el interior del país**, la muestra debe transportarse a temperatura ambiente (el tiempo de transporte no debe exceder las 24 horas).
6. Comunicarse con el laboratorio coordinar la hora de llegada de la muestra para facilitar la disposición de recursos para su procesamiento
7. Enviar la ficha de remisión con los siguientes datos:
  - Nombre de la paciente
  - DNI
  - Edad
  - Semanas de gestación
  - FUR
  - Diagnóstico presuntivo
  - Correo electrónico
  - Número de contacto
  - Nombre del médico tratante