



## INSTRUCCIONES PARA ENVÍO DE MUESTRAS DE MÉDULA ÓSEA PARA ESTUDIO CROMOSÓMICO

1. Solicitar al laboratorio **el kit estéril de transporte** en el que se recolectará la muestra. De no ser posible adquirirlo, puede usar **un tubo vacutainer con heparina de sodio (tapa verde)**.
2. Colectar la primera muestra del aspirado medular, ésta se caracteriza por la presencia de espículas en la muestra, lo que garantizan una muestra de calidad.
3. Agregar de 1 a 3 mL de muestra al tubo que contiene el medio de transporte, tapar inmediatamente; o colocar la muestra en el tubo vacutainer con heparina de sodio y homogenizar suavemente por inversión. **(NO USAR HEPARINA DE LITIO, NI EDTA)**.
4. Enviar la muestra inmediatamente al laboratorio, de no ser posible puede conservarse hasta 24 horas en refrigeración, de 4-8° **(NO CONGELAR)**
5. **Para envíos del interior del país**, enviar la muestra con geles refrigerantes, **evitando el contacto directo del gel con la muestra**. Enviar por el sistema de transporte más rápido posible y comunicarse con el laboratorio para coordinar la hora de llegada de la muestra y de esta manera facilitar la disposición de recursos para su procesamiento.
6. Toda muestra debe ser enviada con los siguientes datos:
  - Nombre completo del paciente
  - Número de DNI
  - Edad
  - Diagnóstico
  - Último recuento de leucocitos
  - Número de teléfono de contacto
  - Correo electrónico
  - Nombre del médico referente.